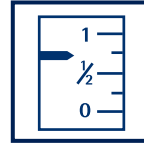


Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. 0570 - 858 450
Fax 0570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Instructiekaart vloeibaar vat en stroller

1. Lees altijd de instructies. 	2. Niet roken. Geen open vuur.  	3. Ventileer de ruimte goed. 
4. Plaats de concentrator niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof. 	5. Plaats het vloeibare vat op een veilige plek zoals aangegeven. Vloeibaar vat moet rechtop gebruikt worden. 	6. Smeermiddel gebruiken waar vet in zit. 
7. Gebruik geen elektrische apparatuur. 	8. Wij adviseren u de neusbril 1x per week te vervangen. 	9. Controleer stand inhoudsmeter. 
10. Maak voor het vullen de vulmond droog met een schone doek. 	11. Topfill vat: plaats de stroller op het vat tot deze vastklikt. Sidefill vat: hang de stroller aan het vat. 	12. Topfill vat: haal de hendel naar beneden waarna de stroller wordt gevuld. Sidefill vat: duw de hendel opzij waarna de stroller wordt gevuld. 
13. Topfill vat: na vulling de stroller d.m.v. indrukken knop ontkoppelen. Sidefill vat: na vulling de stroller draaien om te ontkoppelen 	14. Tijdens de vulling mag het vat niet onbeheerd achter gelaten te worden. 	15. Raak geen koude onderdelen aan van vaten en/of strollers. 
16. Storingen en/of vragen:  Tel. 0570 - 858 450		 Westfalen medical