

Westfalen Medical BV  
Rigastraat 14  
7418 EW Deventer  
رقم الهاتف 0570 - 858 450  
رقم الفاكس 0570 - 858 451  
www.westfalenmedical.com  
info@westfalenmedical.nl

## بطاقة تعليمات اسطوانة الأكسجين والمنظم

<p>3. قم بتهوية المكان جيدًا.</p> 	<p>2. لا تدخن. عدم وجود أي نار مشتعلة.</p> 	<p>1. اقرأ دائمًا التعليمات.</p> 
<p>6. أقصى طول لخرطوم التوصيل.</p> 	<p>5. لا تستخدم الزيت / الشحوم.</p> 	<p>4. قم بوضع اسطوانة الأكسجين دائمًا في وضع رأسي.</p> 
<p>9. في حالة وجود أي عطل و / أو أسئلة: رقم الهاتف 0570 - 858 450</p> 	<p>8. لا تستخدم المعدات الكهربائية.</p> 	<p>7. نوصي باستبدال النظارات الواقية مرة في الأسبوع.</p> 

### إزالة المنظم

1. اغلق الاسطوانة عن طريق فتح الصمام الرئيسي للأسطوانة برفق. يوجد مقبض دوار أعلى الاسطوانة.
2. اضبط مقياس تدفق المنظم على الموضع 2 أو أعلى موضع له.
3. ستسمع الآن / سينطلق الأكسجين المتبقي من المنظم.
4. تأكد من أن كل الأكسجين خارج المنظم من خلال التحقق من المؤشر. يجب ضبط هذا على "0".
5. اضبط مقياس تدفق المنظم على الموضع 0.
6. قم بلف المنظم من الاسطوانة. يمكن القيام بذلك بإصبعين، بدون الحاجة إلى قوة. احذرا! لا يجوز استخدام أي أدوات لهذا الغرض.

### مكان المنظم

1. قم بلف المنظم على الاسطوانة (محكم اليد). تأكد من أن يديك نظيفة وخالية من الدهون.
2. افتح الاسطوانة عن طريق فتح الصمام الرئيسي للأسطوانة برفق. يوجد مقبض دوار أعلى الاسطوانة.
3. قم بظبط مقياس التدفق (عدد اللترات في الدقيقة) حسب توجيهات الطبيب.
4. لا يوجد أي تدفق: تحقق من التدفق عن طريق وضع نظارات و / أو أنبوب في كوب من الماء. في حالة عدم وجود فقاعات، افحص الخرطوم وتحقق من مقياس التدفق. إن كنت لا تجد أي تدفق، يُرجى الاتصال بـ Westfalen Medical