



Instructiekaart Aansluiten zuurstof op CPAP met de Climate Line Air Oxy tube



zuurstofinfo.nl/
downloads

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP-apparaat wanneer u gebruik maakt van de Climate Line Air Oxy tube. Deze slang kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ResMed AirSense 10.

Let op: Om te voorkomen dat er zuurstof in het CPAP-apparaat kan stromen waardoor storingen kunnen ontstaan, is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP-apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst het CPAP-apparaat in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna het CPAP-apparaat uit.



ResMed AirSense 10

Zuurstofconnector
(aansluiting voor de
zuurstofslang)



Climate Line Air Oxy tube

- 1** Sluit de Climate Line Air Oxy tube aan op de luchttuitlaat.



- 2** Verwijder het dopje van de zuurstofaansluiting.



- 3** Sluit de zuurstofslang op de zuurstofconnector aan.



- 4** Storingen en/of vragen:
Zuurstof: Tel. 0570-858 450
Slaapapneu: Tel. 0570-234 625



**Westfalen
Medical**