



Instructiekaart Aansluiten zuurstof op CPAP met een standaard slang



zuurstofinfo.nl/
downloads

In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de Philips DreamStation 2. Wanneer u een ander apparaat heeft ziet het er anders uit, maar in alle gevallen moet de connector tussen het CPAP-apparaat en de slang bevestigd worden. Zie achterzijde van deze instructiekaart om te zien waar de aansluiting zich op uw apparaat bevindt.

Let op: Om te voorkomen dat er zuurstof in het CPAP-apparaat kan stromen waardoor storingen kunnen ontstaan, is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in-en uitschakelen van het CPAP-apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst het CPAP-apparaat in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna het CPAP-apparaat uit.



- 1** Haal de slang van de uitlaatpoort van uw CPAP-apparaat.



- 2** Plaats de connector op de uitlaatpoort van uw CPAP-apparaat.



- 3** Plaats de slang op uw connector.



- 4** Verwijder het dopje van de zuurstofaansluiting.



- 5** Sluit de zuurstofslang aan op de zuurstofaansluiting.



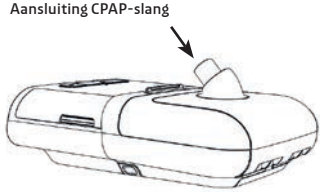
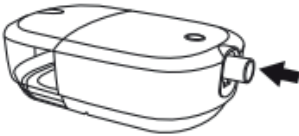
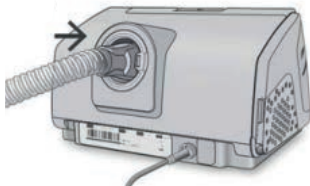
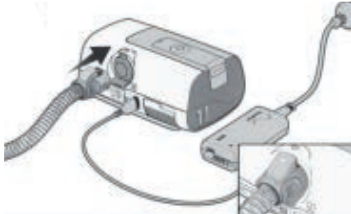
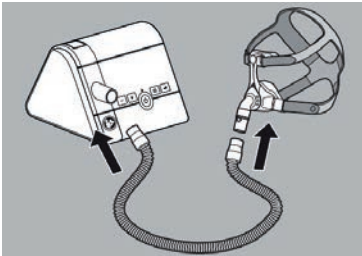
- 6** Storingen en/of vragen:
Zuurstof: Tel. 0570-858 450
Slaapapneu: Tel. 0570-234 625



**Westfalen
Medical**



Aansluitingen CPAP-apparaten

Philips Dreamstation 1	 Aansluiting CPAP-slang	Philips Dreamstation 2	 Aansluiting CPAP-slang
ResMed AirSense 10	 Aansluiting CPAP-slang	ResMed AirSense 11	 Aansluiting CPAP-slang
Löwenstein Prisma Smart Max	 Aansluiting CPAP-slang		