



Instructiekaart Aansluiten zuurstof op CPAP met een verwarmde slang



zuurstofinfo.nl/
downloads

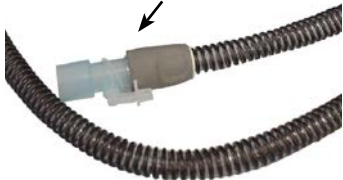
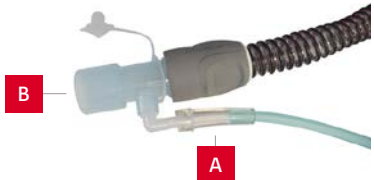
Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP-apparaat wanneer u gebruik maakt van een verwarmde slang. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de ResMed AirSense 11. Wanneer u een ander apparaat heeft ziet het er anders uit, maar in bijna alle gevallen moet de connector aan het einde van de slang geplaatst worden.

Heeft u een Löwenstein Prisma Smart Max, dan plaatst u de connector tussen het apparaat en de slang.

Let op: Om te voorkomen dat er zuurstof in het CPAP-apparaat kan stromen waardoor storingen kunnen ontstaan, is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP-apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst het CPAP-apparaat in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna de CPAP uit.

 Connector CPAP-slang		 ResMed AirSense 11
1 Plaats de connector op het uiteinde van de verwarmde CPAP-slang.	2 Verwijder het dopje van de zuurstofconnector.	3 Plaats de zuurstofslang (A) op de zuurstofconnector. Sluit het masker (B) aan op het uiteinde van de connector.
		
4 Storingen en/of vragen: Zuurstof: Tel. 0570-858 450 Slaapapneu: Tel. 0570-234 625		
 Westfalen Medical		