

**Westfalen Medical BV**  
Rigastraat 14  
7418 EW Deventer  
Tel. 0570 - 234 625  
Fax 0570 - 858 451  
www.cpapinfo.nl  
cpapinfo@westfalen.com

## Instructiekaart aansluiten zuurstof op CPAP met de Climate Line Air Oxy tube

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP apparaat wanneer u gebruik maakt van de Climate Line Air Oxy tube. Deze slang kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ResMed AirSense 10.

**Let op:** Om te voorkomen dat er zuurstof in de CPAP kan stromen waardoor storingen kunnen ontstaan, is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst de CPAP in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna de CPAP uit.

<p><b>1.</b> ResMed AirSense 10.</p> 	<p><b>2.</b> Sluit de Climate Line Air Oxy tube aan op de luchtuitlaat.</p> 	<p><b>3.</b> Zuurstofconnector (aansluiting voor de zuurstofslang).</p> 
<p><b>4.</b> Verwijder het dopje.</p> 	<p><b>5.</b> Sluit de slang op de zuurstofconnector aan.</p> 	 <p><b>Westfalen</b> medical</p> <p>Neem bij vragen of twijfel contact met ons op.</p>  0570 - 234 625