

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. 0570 - 234 625
Fax 0570 - 858 451
www.cpapinfo.nl
cpapinfo@westfalen.com






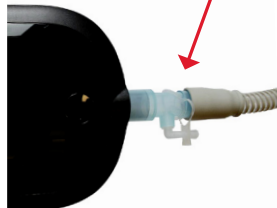




Instructiekaart aansluiten zuurstof op CPAP met een standaard slang

Deze instructie laat zien hoe u zuurstof aansluit op een CPAP apparaat wanneer u gebruik maakt van een standaard slang. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de Philips Dreamstation 2. Andere merken zien er anders uit, maar in alle gevallen is de slang met een rubberen uiteinde aangesloten op het apparaat. Het aansluiten van de connector voor zuurstof zal daarom vergelijkbaar zijn.

Let op: Om te voorkomen dat er zuurstof in de CPAP kan stromen waardoor storingen kunnen ontstaan, is het van belang om de juiste volgorde aan te houden bij het in- en uitschakelen van het CPAP apparaat en de zuurstof.

Inschakelen: schakel eerst de CPAP in, start daarna de zuurstof.

Uitschakelen: stop eerst de zuurstof, schakel daarna de CPAP uit.

<p>1. Connector CPAP-zuurstof.</p> 	<p>2. Philips DreamStation 2.</p> 	<p>3. Aansluiting CPAP-slang.</p> 
<p>4. Haal de slang van de uitlaatpoort van de CPAP.</p> 	<p>5. Plaats de connector op de uitlaatpoort van de CPAP.</p> 	<p>6. Plaats de slang op de connector.</p> 
<p>7. Verwijder het dopje van de zuurstofaansluiting.</p> 	<p>8. Sluit de zuurstof slang aan op de zuurstofaansluiting.</p> 	 <p>Westfalen medical</p> <p>Neem bij vragen of twijfel contact met ons op.</p>  0570 - 234 625