



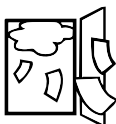


Instructiekaart Homefill® compressor

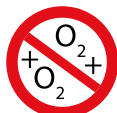

zuurstofinfo.nl/
downloads




1 Lees altijd de instructies. 	2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen e-smoker/vape.  	3 Gebruik geen olie en/of vethoudende producten. 
4 Ventileer de ruimte goed. Kijk voor advies op de meegeleverde ventilatiewijzer. 	5 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de Homefill® staat en waar de cliënt aanwezig is. 	6 Plaats de Homefill® niet onder de kapstok of tegen de gordijnen. Dit i.v.m. verzadiging zuurstof. 
7 Er mogen geen verlengkabels worden gebruikt. 	8 Technisch onderhoud mag alleen verricht worden door de servicemedewerker. 	9 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450  Westfalen Medical

Homefill
compressor

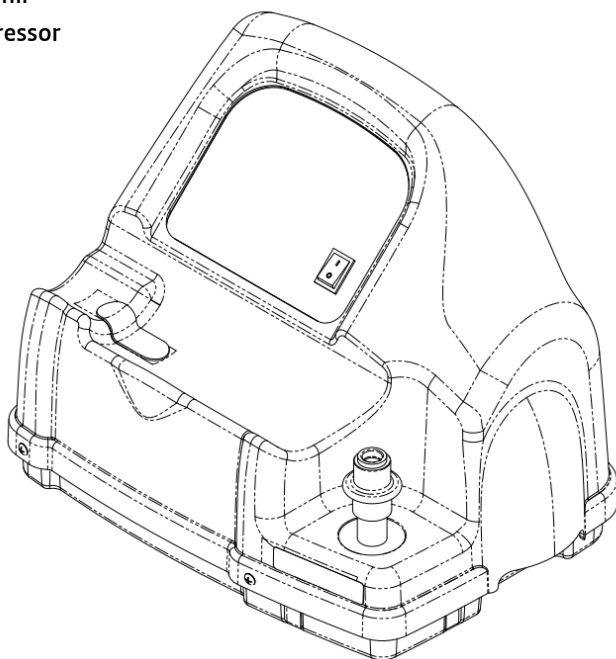




Instructiekaart Homefill® cilinder

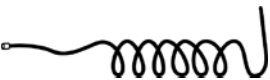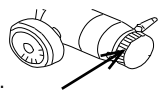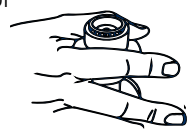1 Zet de concentrator aan d.m.v. de aan-uit knop. aan ● uit ○	2 Stel de flow in op de concentrator. Let op: Stel de flow niet hoger in dan: Perfect O2 2,5L/min Platinum S 2,5 L/min Platinum 9 6,5 L/min DeVilbiss C525 2,5L/min DeVilbiss 1025 7,5 L/min	3 Verbind de Homefill® compressor, met de concentrator d.m.v. de gekrulde zuurstofslang. 
4 LET OP! De cilinder dient leeg te zijn, voor deze gevuld wordt. Ook stel je tijdens het vullen de flowmeter in op 0/off. De cilinder is leeg als deze in het rode vlak wijst. 	5 Controleer voor het aansluiten van de cilinder de huls op de Homefill® compressor of de groene stippen zichtbaar zijn. Zo niet, duw naar beneden. 	6 Klik de cilinder in de vulconnector, je hoort een duidelijke klik. De groene punten in de huls zijn nu niet meer zichtbaar.
7 Zet de Homefill® compressor aan. aan ● uit ○	8 Na het aansluiten van de cilinder kunt u de voortgang volgen door het aflezen van de LED-indicatoren. LET OP! Het kan een paar minuten duren voordat de compressor begint met vullen.	9 Is de cilinder vol? Zet de compressor uit. Hierna kan je deze afkoppelen door de ring van de vulconnector naar beneden te drukken. 
10 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450  Westfalen Medical		

On demand
cilinder

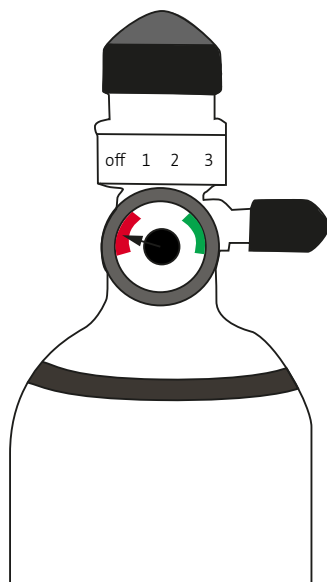

Continu
cilinder

