

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
رقم الهاتف 0570 - 858 450
رقم الفاكس 0570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

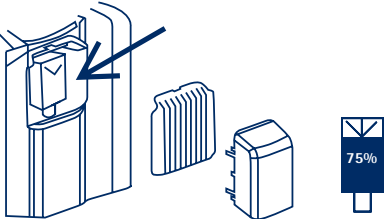
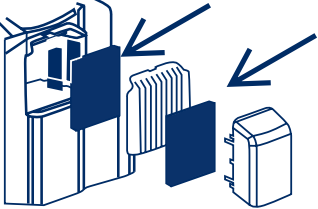
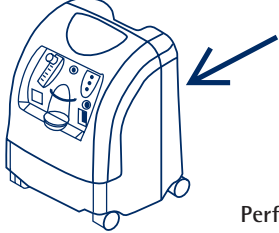
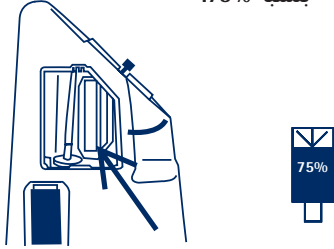
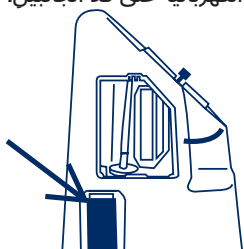
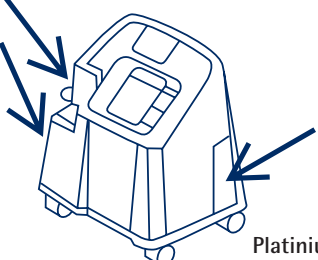
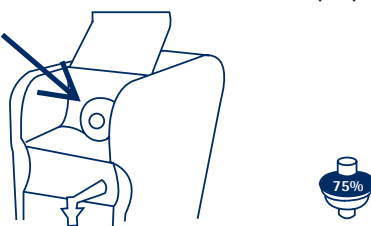

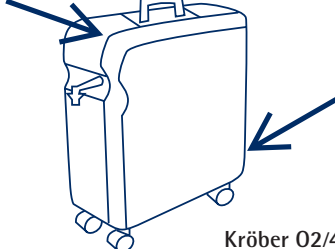
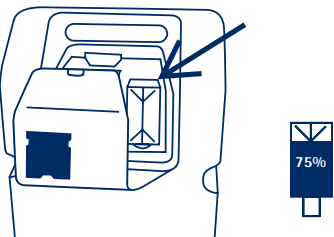
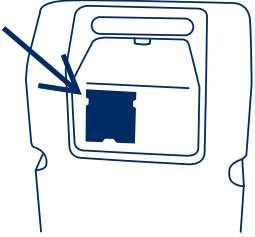
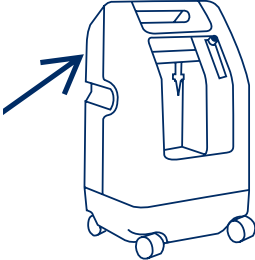
بطاقة تعليمات مكثف الأوكسجين

<p>3. قم بتهوية المكان جيدًا.</p> 	<p>2. لا تدخن عدم وجود أي نار مشتعلة.</p> 	<p>1. اقرأ دائمًا التعليمات.</p> 
<p>6. لا تستخدم الزيت / الشحوم.</p> 	<p>5. ضع المكثف في مكان آمن حسب التوجيهات. يجب استخدام المكثف بشكل عمودي.</p> 	<p>4. لا تضع المكثف تحت رف المعاطف أو على الستائر. هذا فيما يتعلق بتشبع الأكسجين.</p> 
<p>9. نوصي باستبدال النظارات الواقية مرة في الأسبوع.</p> 	<p>8. أقصى طول لخرطوم التوصيل.</p> 	<p>7. لا تستخدم المعدات الكهربائية.</p> 
<p>12. تحقق من التدفق عن طريق وضع نظارات و / أو أنبوب في كوب من الماء. في حالة عدم وجود فقاعات، افحص الخرطوم وتحقق من مقياس التدفق. في حالة عدم وجود أي تدفق، قم بالاتصال بـ Westfalen.</p> 	<p>11. قم بظبط مقياس التدفق حسب توجيهات الطبيب.</p> 	<p>10. قم بتشغيل المكثف. قم بتوصيل سلك الطاقة وتشغيل المكثف.</p> 
<p>15. أغلق المكثف بعد الاستعمال. لا تقم بتشغيل المكثف عندما يكون الجهاز غير مستخدم.</p> 	<p>14. لا يجوز استخدام كبلات تمديد.</p> 	<p>13. يجب تنظيف الفلتر الخشن أسبوعيًا. يمكن العثور عليها على جانب و / أو خلف المكثف.</p> 
<p>18. في حالة وجود أي عطل و / أو أسئلة:</p> 	<p>17. في حالة وجود أي عطل و / أو أسئلة:</p> 	<p>16. لا يجوز إجراء الصيانة الفنية إلا من قبل موظف الخدمة.</p> 

رقم الهاتف 0570 - 858 450

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
رقم الهاتف 0570 - 858 450
رقم الفاكس 0570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

بطاقة تعليمات خاصة بالفلاتر

<p>3. استبدل فلتر المدخل خلف الفلتر الخشن إذا أصبح لونه أسود بنسبة 75%.</p> 	<p>2. قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا.</p> 	<p>1. الفلاتر موجودة في الخلف.</p>  <p>Perfect O2</p>
<p>3. استبدل فلتر المدخل إذا أصبح لونه أسود بنسبة 75%.</p> 	<p>2. قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة الكهربائية على كلا الجانبين.</p> 	<p>1. الفلاتر موجودة على كلا الجانبين.</p>  <p>Platinum S/9</p>
<p>3. استبدل فلتر المدخل إذا أصبح لونه أسود بنسبة 75%.</p> 	<p>2. قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا.</p> 	<p>1. الفلاتر موجودة على كلا الجانبين.</p>  <p>Kröber O2/4.0</p>
<p>3. استبدل فلتر المدخل إذا أصبح لونه أسود بنسبة 75%.</p> 	<p>2. قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا.</p> 	<p>1. الفلاتر موجودة في الخلف.</p>  <p>DeVilbiss</p>