

Zuurstofcilinder 10 liter

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruikstijd in uren:
0,25	120 uur
0,50	60 uur
0,75	40 uur
1,0	30 uur
1,5	22 uur en 30 minuten
2,0	15 uur
2,5	12 uur en 30 minuten
3,0	10 uur
4,0	8 uur
5,0	6 uur en 15 minuten
6,0	5 uur
7	4 uur en 30 minuten
8	4 uur
9	3 uur en 30 minuten
10	3 uur
12	2 uur en 30 minuten
15	2 uur
25	1 uur en 15 minuten

Overige specificaties

Gewicht 15,5 kilo zonder reduceertoestel
Hoogte 108 cm
Diameter 14 cm

Let op! De tijden die bij de apparatuur staan, zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De werkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.